

PRECAUCIÓN

Posibilidad de Error en la Lectura de Glucosa en la Sangre

Nombre del Paciente

Está usando Solución de Diálisis
Peritoneal **EXTRANEAL** (Icodextrina)

Baxter

Baxter y EXTRANEAL son marcas registradas de Baxter International Inc.

EMPLEE SOLAMENTE monitores de glucosa y tiras de control que sean glucosa - específicos. Estos métodos son comunes en los laboratorios clínicos. Contacte al fabricante del monitor de glucosa y al de las tiras de control para determinar el método utilizado.

NO USE monitores de glucosa o tiras de control que utilicen métodos basados en glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH-PQQ) o la glucosa-di-oxidoreductasa. Adicionalmente, algunos pero no todos los monitores y tiras de control que utilicen métodos basados en glucosa deshidrogenasa flavin-adenina dinucleotida (GDH-FAD) no deberían ser usados. El uso de estos métodos puede resultar en una lectura de glucosa en sangre falsamente elevada en aquellos pacientes que usen **EXTRANEAL** (icodextrina) debido a la interferencia de la maltosa. La lectura de glucosa en sangre falsamente elevada podría ocultar una hipoglucemia real o provocar un diagnóstico errado de hipoglucemia, que pudiera causar eventos potencialmente fatales.

Para más información visite www.glucosesafety.com, en donde encontrará una lista de monitores de glucosa compatibles.

Julio de 2010