

PRECAUCION

Posibilidad de Error en la Lectura de Glucosa en la Sangre

Nombre del Paciente

**Esta usando Solución de
Diálisis Peritoneal
EXTRANEAL (icodextrina)**

Baxter

BAXTER y EXTRANEAL son marcas registradas de Baxter International.

EMPLEE SÓLO monitores de glucosa y tiras de control que sean glucosa-específicos. Estos métodos son comunes en los laboratorios clínicos. Contacte al fabricante del monitor de glucosa y tiras de control para determinar el método usado.

NO USE monitores de glucosa o tiras de control que utilicen la enzima glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH-PQQ) o la glucosa-di-oxidoreductasa. Esto podría ocasionar una lectura de glucosa en sangre falsamente elevada en los pacientes que usen **EXTRANEAL** (icodextrina), lo cual podría ocultar una hipoglucemia real o provocar un diagnóstico errado de hiperglucemia, causando eventos potencialmente fatales. Para más información, visite www.GlucoseSafety.com o llame a la línea 018000939595.