

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

Land: Danmark (Denmark)

Vigtig information om anvendelse af blodsukkerapparater og teststrimler hos patienter, der bruger EXTRANEAL (icodextrin)

Denne liste over blodsukkerapparater og teststrimler er lavet ud fra en søgning via internet, litteratur, interne Baxter undersøgelser, information fra myndigheder, produktinformation for teststrimler, sikkerhedsadvarsler og anden information fra producenterne af produkterne. Vi har forsøgt at indsamle nøjagtig og aktuel information, men da Baxter ikke producerer blodsukkerapparater eller teststrimler, kan vi ikke garantere for den nuværende eller fortsatte nøjagtighed af listen. Kontakt derfor producenten af blodsukkerapparatet og teststrimlerne for at få den senest gældende information før brug sammen med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske.

- EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske indeholder icodextrin. Maltose, der er et nedbrydningsprodukt af icodextrin, kan påvirke visse blodsukkerapparater eller teststrimler. Hos patienter, der bruger blodsukkerapparater eller teststrimler, som er uforlidelige med EXTRANEAL (icodextrin) kan det betyde, at der måles en falsk forhøjet blodsukkerværdi.
- Dette kan maskere en sand hypoglykæmi eller føre til en fejlagtig diagnose af hyperglykæmi. Måling af en blodsukkerværdi indenfor eller over normalområdet hos en patient, som bruger EXTRANEAL (icodextrin) ved brug af disse apparater eller teststrimler kan maskere lavt blodsukker. Dette kan betyde, at en patient eller sundhedspersonale ikke gør det nødvendige for at få blodsukkeret ind i normalområdet igen. Måling af en falsk forhøjet blodsukkerværdi kan til gengæld forårsage, at en patient får mere insulin end nødvendigt. Begge disse situationer kan føre til livstruende hændelser som bevidstløshed, koma, hjerneskade eller død.
- Hvis du er usikker på, om det blodsukkerapparat eller de teststrimler du anvender, påvirkes af icodextrin eller maltose, kan du eller dialyseafdelingen kontakte producenten. Læs også produktinformationen, der er vedlagt blodsukkerapparatet eller teststrimlerne.
 - Nedenstående liste kan anvendes som eksempler på produkter. Listen skal ikke ses som en anbefaling af specifikke blodsukkerapparater eller teststrimler.
 - Listen viser, hvor der er identificeret forlidelighed med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske. **Der må KUN anvendes glukosespecifikke blodsukkerapparater eller teststrimler der er forlidelige med EXTRANEAL (icodextrin) hos patienter, der bruger denne peritonealdialysevæske.** Teststrimler er anført sammen med de blodsukkerapparater, de passer til – hvis du bruger andre teststrimler, kontakt da producenten for at finde ud af, om de er glukosespecifikke. Listen indeholder kontaktinformation til producenterne af de mest almindelige blodsukkerapparater/teststrimler.
 - Listen er ikke fyldestgørende. Den gælder fra august 2011. Selvom dit specifikke blodsukkerapparat eller teststrimler, ikke fremgår af listen, betyder det IKKE nødvendigvis, at det er forlideligt med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske. Kontakt altid producenten for aktuel information, hvis du er i tvivl. Baxter er ikke forpligtet til at opdatere indholdet i denne liste.

BLODSUKKERAPPARATER

Opdateret august 2011

Blodsukkerapparat	Forlidelig med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske (glukosespecifik)	Testtype*	Producent
Boots	Ja	GDH-NAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com www.abbottdiabetescare.dk Tlf. 3977 0190
Omron HEA-214	Ja	GDH-NAD	
Optium	Ja	GDH-NAD	
Optium Easy	Ja	GDH-NAD	
OptiumEZ	Ja	GDH-NAD	
Optium Xceed	Ja	GDH-NAD	
Optium Xido	Ja	GDH-NAD	
Precision PCx	Ja ¹	GDH-NAD, GO ¹	
Precision QID ^B	Ja	GO	
Precision Xceed	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Precision Xtra	Ja	GDH-NAD	
Precision Xtra OK	Ja ¹	GDH-NAD, GO ¹	
ReliOn Ultima	Ja	GDH-NAD	
Sof-Sense	Ja	GDH-NAD	
Sof-Tact ^C	Ja	GDH-NAD	
TrueSense	Ja	GDH-NAD	

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

Blodsukkerapparat	Forligelig med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske (glukosespecifik)	Testtype*	Producent
FreeStyle ² FreeStyle ² FreeStyle 3 ² FreeStyle 3 ² FreeStyle 5 ² FreeStyle 5 ² FreeStyle Flash ² FreeStyle Flash ² FreeStyle Freedom ² FreeStyle Freedom ² FreeStyle Freedom Lite ² FreeStyle Freedom Lite ² FreeStyle Lite ² FreeStyle Lite ² FreeStyle Mini ² FreeStyle Mini ² FreeStyle Papillon ² FreeStyle Papillon ² FreeStyle Papillon Lite ² FreeStyle Papillon Lite ² FreeStyle Papillon Mini ² FreeStyle Papillon Mini ² FreeStyle Papillon Vision ² FreeStyle Papillon Vision ²	Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ² Ja ² Nei ²	GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ² GDH-FAD ² GDH-PQQ ²	
CoZmonitor FreeStyle Tracker Optium Mini Optium Omega	Nei Nei Nei Nei	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	
Advance Intuition Assure Platinum Assure Pro Assure 3 Assure 4 GLUCOCARD 01 GLUCOCARD 01-mini GLUCOCARD Vital PocketChem EZ	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja	GO GO GO GO GO GO GO GO GO	Arkray www.arkravusa.com
GLUCOCARD X-meter ^D	No ³	GDH-FAD ³	
Ascensia Breeze Ascensia Brio Ascensia Confirm Ascensia Dex Ascensia Entrust	Ja Ja Ja Ja Ja	GO GO GO GO GO	Bayer Healthcare www.ascensia.com www.bayerdiabetes.dk

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

Blodsukkerapparat	Forligelig med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske (glukosespecifik)	Testtype*	Producent
Ascensia Esprit Breeze 2 Contour Contour Link Contour TS Contour USB Didget Elite	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja	GO GO GDH-FAD GDH_FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO	Tlf. 4523 5000
OneTouch InDuo One Touch Ping OneTouch Select OneTouch SureStep OneTouch Ultra ^E OneTouch Ultra 2 One TouchUltraLink OneTouch UltraMini OneTouch UltraSmart OneTouch Verio One Touch Verio Pro One Touch Vita SureStep Flexx	Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja	GO GO GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com http://www.lifescaneurope.com/den/ Tlf. 7022 6071
Accu-Chek Aviva ⁴ Accu-Chek Aviva ⁴ Accu-Chek Aviva Combo ⁴ Accu-Chek Aviva Combo ⁴ Accu-Chek Aviva Expert ⁴ Accu-Chek Aviva Expert ⁴ Accu-Chek Aviva Nano ⁴ Accu-Chek Aviva Nano ⁴ Accu-Chek Inform II ⁴ Accu-Chek Inform II ⁴ Accu-Chek Performa ⁴ Accu-Chek Performa ⁴ Accu-Chek Performa Nano ⁴ Accu-Chek Performa Nano ⁴ Accu-Chek Performa Combo ⁴ Accu-Chek Performa Combo ⁴	Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴ Ja ⁴ Nei ⁴	Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴	Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.dk www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com http://www.accu-chek.dk/nordic/?gclid=CI_f9LPkqpMCFQSIMAod1R3GoQ Roche a/s Tlf. 3639 9999
Accu-Chek Active/S System Accu-Chek Advantage ^A Accu-Chek Comfort Accu-Chek Compact Accu-Chek Compact Plus ^A Accu-Chek Complete System Accu-Chek Go/Go S System Accu-Chek GTS/GTS Plus Accu-Chek Inform System Accu-Chek Inform Accu-Chek Integra System Accu-Chek Plus Accu-Chek Sensor Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

¹ To typer teststrimler **forligelige** for Precision PC x og Precision Xtra OK.

² Disse blodsukkerapparatmærker kan anvende GDH-PQQ (**uforligelige**) og GDH-FAD (**forligelige**) teststrimler. Kontakt producent for yderligere information.

³ Denne ARKRAY GDH_FAD blodsukkerapparat/teststrimmel er **uforligelig**. Kontakt producent for yderligere information

⁴ Disse blodsukkerapparatmærker kan anvende GDH-PQQ (**uforligelige**) og Mut Q-GDH (**forligelige**) teststrimler. Kontakt producent for yderligere information

Testtype*

GO= glucose oxidase

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase med pyrroloquinolinequinone (bemærk GDO, glucose-dye-oxidoreductase er en **uforligelig** PQQ-baseret metode).

GDH-NAD= glucose dehydrogenase med nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase med flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase med pyrroloquinolinequinone er modificeret til at eliminere påvirkningen af maltose

Test Type*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Referencer:

^A Baxter study 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage systems.

^B Baxter report REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.

^C Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit MediSense Softact with icodextrin and its metabolites.

^D Baxter report Interim 3, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometer-GlucoCard X-Meter (Arkray).

^E Baxter report Interim 1, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers.

Se venligst vedlagte produktresumé for EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske.

Baxter og EXTRANEAL er varemærker hos Baxter International Inc.

De andre varemærker eller produkter her på siderne tilhører de respektive producenter.