

Ország specifikus vércukorszintmérő készülék lista

Ország: Magyarország (Hungary)

Fontos információk

Ez a lista a következő forrásokból származik: internet, szakirodalom, Baxter tanulmányok, hatósági irodák információi, tesztsík használati utasítások, biztonsági figyelmeztetések, és közvetlen információk a gyártóktól. A tájékoztató pontos és aktuális információk közlésére törekszik, azonban nem garantálja az információk helyességét, mivel nem a Baxter gyártja a vércukorszintmérő készülékeket és tesztsíkokat. Az EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldattal való kezelés során történő vércukormérés előtt a legfrissebb információkért keresse fel a vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok gyártóját.

1. Az EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldat ikodextrint tartalmaz. A maltóz, az ikodextrin metabolitja befolyásolja a vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok működését, melynek eredményeként vércukorszint méréskor tévesen magas érték jelentkezhethet.
2. A helytelen mérési eredmények elfedhetik a valódi hipoglikémiát, vagy téves hiperglikémia diagnózishoz vezethetnek. Azon betegeknek, akik vércukorszintjét ilyen készülékekkel olvassák le és EXTRANEAL (Ikodextrin) kezelésben részesülnek a normál és az afölötti tartományban elfedheti az alacsony vércukorszintet. Ennek következtében előfordulhat, hogy a beteg, vagy az egészségügyi szakember nem teszi meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a vércukorszintet a normál tartományba emelje. A leolvasott, tévesen magas vércukorszint következtében pedig előfordulhat, hogy a beteg a szükségesnél több inzulint kap. Mindkét eset életveszélyes állapotokhoz vezethet, úgymint eszméletvesztés, kóma, neurológiai károsodások vagy halál.
3. A dialízist végző személyzet vagy a beteg keresse fel a vércukorszintmérő készülékek és/vagy a tesztsíkok gyártóját, hogy meggyőződjön arról, biztosan glükózszerkezetű-e a használandó készülék, így nem zavarja az ikodextrin és a maltóz a meghatározást. A vércukorszintmérő készülékekhez és tesztsíkokhoz mellékelt termék ismertetőt is olvassa el.
 - Az alábbi lista csak tájékoztató jellegű. Nem tartalmaz ajánlást egyik vércukorszintmérő készülékre vagy tesztsíkra sem.
 - Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a készülékek specifikusak-e glükózra. **CSAK glükózszerkezetű készülékekkel és tesztsíkokkal mérjen vércukorszintet EXTRANEAL (Ikodextrin) peritoneális dializáló oldattal kezelt betegeknek.** A tesztsíkok a hozzájuk tartozó készülékekkel vannak felsorolva – amennyiben Ön más tesztsíkot használ, ellenőrizze a gyártónál, hogy glükózszerkezetű-e. A táblázat információval szolgál a leggyakoribb vércukorszintmérő készülékek és tesztsíkok gyártójáról.
 - A lista nem teljes, az adatok 2009. február 16-án lettek frissítve. Ha az Ön vércukorszintmérő készülékét vagy a tesztsíkot a lenti táblázat nem tartalmazza, az **NEM** jelenti azt, hogy az glükózszerkezetű. További információkért lépjen kapcsolatba a gyártóval.

VÉRCUKORSZINTMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

Frissítve: 2009. február 16.

Vércukorszintmérő készülék típusok	Extraneal (Ikodextrin) dializáló oldat kezelés mellett használható-e a készülék (specifikus-e glükózra)	A teszt típusa*	Gyártó
CoZmonitor	Nem	GDH-PQQ	Pharma-Marketing Kft. www.pharma-marketing.hu phone: +36 1 242 2146
FreeStyle	Nem	GDH-PQQ	
FreeStyle Flash	Nem	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom	Nem	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom Lite	Nem	GDH-PQQ	
Freestyle Lite	Nem	GDH-PQQ	
FreeStyle Mini	Nem	GDH-PQQ	
FreeStyle Tracker	Nem	GDH-PQQ	
Optium Omega	Nem	GDH-PQQ	
Optium	Igen	GDH-NAD	
Optium Xceed	Igen	GDH-NAD	
Precision PCx	Igen ¹	GDH-NAD, GOD ¹	
Precision QID ^B	Igen	GOD	
Precision Xceed	Igen	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Igen	GDH-NAD	
Precision Xtra	Igen	GDH-NAD	
Sof-Sense	Igen	GDH-NAD	
Sof-Tact ^C	Igen	GDH-NAD	

Vércukorszintmérő készülék típusok	Extraneal (Ikodextrin) dializáló oldat kezelés mellett használható-e a készülék (specifikus-e glükózra)	A teszt típusa*	Gyártó
Advance Intuition Advance Microdraw Assure Pro Assure II Assure III Quick Tek	Igen Igen Igen Igen Igen Igen	GOD GOD GOD GOD GOD GOD	Arkray www.arkrayusa.com
Ascensia Contour	Nem²	GDH-PQQ²	Bayer Healthcare
Ascensia Contour Ascensia Contour TS Ascensia Breeze Ascensia Breeze 2 Ascensia Brio Ascensia Confirm Ascensia Dex Ascensia Elite Ascensia Entrust Ascensia Esprit	Igen ² Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen	GDH-FAD ² GDH-FAD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD	Bayer Hungária Kft. Contact: aniko.pill.ap@bayer-ag.de Info-bavhun@bayer-ag.de Phone: +36 1 487 4100
Fast Take InDuo System One Touch Basic ^B One Touch Fast Take One Touch Profile ^B One Touch SureStep One Touch II One Touch Ultra One Touch Ultra 2 One Touch Ultra Mini One Touch Ultra Smart	Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen	GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD	Johnson&Johnson Kft. Contact: ereichert@its.jnj.com Phone: +36 23 510 919
Accu-Chek Active/S System Accu-Chek Advantage ^A Accu-Chek Aviva Accu-Chek Comfort Accu-Chek Compact Accu-Chek Compact Plus ^A Accu-Chek Complete System Accu-Chek Go/Go S System Accu-Chek GTS/GTS Plus Accu-Chek Inform System Accu-Chek Integra System Accu-Chek Performa Accu-Chek Plus Accu-Chek Sensor Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	Roche(Magyarország)Kft. www.accu-chek.hu Contact: andrea.cziraki@roche.com lajos.hodossy@roche.com Phone: +36 23 446 871
DCont Cabrio DCont Personal Dcont Partner Dcont Personal Optimum Dcont Personal Optimum Plusz SensoCard SensoCard Plus SensoLite Nova SensoLite Nova Plus	Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GOD GOD GOD GOD	77 Elektronika Kft. www.e77.hu Phone: +36 1 206 1480

Vércukorszintmérő készülék típusok	Extraneal (Ikodextrin) dializáló oldat kezelés mellett használható-e a készülék (specifikus-e glükózra)	A teszt típusa*	Gyártó
GlucoTalk	Igen	GOD	
SD-Check Gold 01GM10	Igen	GOD	Standard Diagnostic Inc. local contact: www.medxpert.hu Phone: +36 23 370 801
Multicare	Igen	GOD	Biochemical System Int. Srl. local contact: www.hungimpex.hu Phone: +36 1 453 7100

¹ Kétféle teszt típus a PCx készülékhez.

² Kétféle teszt típus a Contour készülékhez.

Az összeférhetőség igazolása céljából keresse fel a gyártót.

Teszt Típus*

GOD= glükóz-oxidáz (más néven GO)

GDH-PQQ= glükóz-dehidrogenáz pirrolo-kinolin-kinon-nal

GDH-NAD= glükóz-dehidrogenáz nikotinamid-adenin-dinukleotid-dal

GDH-FAD= glükóz-dehidrogenáz flavin-adenin-dinukleotid-dal

Test Type*

GOD= glucose oxidase (also referred to as GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Irodalomjegyzék:

^A Baxter tanulmány 32386 (McGaw Park) Az ikodextrin és metabolitjainak zavaró hatása vércukorszint mérésekor Accu-Chek compact és Advantage készülék használata esetén.

^B Baxter jelentés REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Az ikodextrin zavaró hatásának értékelése vércukorszint mérésekor (enzimatis módszereket használva).

^C Baxter jelentés RD-01-RE-233 (McGaw Park) Az ikodextrin és metabolitjai zavaró hatásának értékelése vércukorszint mérésekor MediSense Sof-Tact készülék esetén.

Olvassa el az EXTRANEAL (ikodextrin) peritoneális dializáló oldat részletes alkalmazási előírását.

A Baxter és az Extraneal a Baxter International Inc. védjegyzett márkanévei.

Az itt feltüntetett minden egyéb védjegy a megfelelő gyártó saját tulajdona.