

רשימת בקרי גלוקוז לפי מדינות

שם המדינה: ישראל (Israel)

מידע חיוני למטופלים המשתמשים בבקרי גלוקוז ומקלוני בדיקה ומקבלים טיפול ב-EXTRANEAL (Icodextrin) (7.5%)

רשימה זו הורכבה לאחר חיפוש באינטרנט, בספרות הרפואית, במחקרים פנימיים של Baxter, ממידע מסוכנויות ממשלתיות, מעלוני של סרטי בדיקה, מהתראות בטיחות וממידע שהתקבל ישירות מיצרני המוצר. למרות שנעשו מרב המאמצים כדי לספק מידע בהיר ועדכני, חברת Baxter אינה מייצרת את בקרי הגלוקוז או את מקלוני הבדיקה ולפיכך, אינה ערבה למידת הדיוק הראשונית או המתמשכת של המידע. נא פנה ליצרנים של בקרי הגלוקוז וסרטי הבדיקה כדי לקבל את המידע העדכני ביותר אודות תאימות, לפני השימוש במוצרים יחד עם התמיסה EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%) לדיאליזה פריטוניאלית.

1. התמיסה EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%) מכילה Icodextrin, Maltose, תוצר ביולוגי של Icodextrin, עלול להפריע לפעולתם של בקרי גלוקוז או מקלוני בדיקה מסוימים. הפרעה זו תגרום לתוצאה גבוהה ולא מדויקת בעת בדיקת גלוקוז באמצעות הבקרים או מקלוני הבדיקה.
2. הפרעה זו עלולה להסתיר היפוגליקמיה או להוביל לאבחנה שגויה של היפרגליקמיה. לפיכך, תוצאה גבוהה או נורמאלית של בדיקת גלוקוז בדם בחולה המשתמש בתמיסה EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%) עלולה להסתיר מצב של רמת סוכר נמוכה. הדבר יגרום לחולה או למטפל להימנע מהצעדים הדרושים כדי להעלות את רמת הסוכר לרמה נורמלית. לחלופין, תוצאה גבוהה שאינה מדויקת עלולה לגרום למתן כמות אינסולין גבוהה מהדרוש למטופל. שני התרחישים עלולים לגרום לסכנת חיים, כולל אבדן הכרה, קומה, נזק ניורולוגי או מוות.
3. על מחלקת הדיאליזה או החולה לפנות ליצרן של בקר הגלוקוז או מקלוני הבדיקה כדי לברר אם הם פגיעים להפרעה של Icodextrin או התוצר שלו Maltose, או לחלופין אם הם מודדים אך ורק גלוקוז. נוסף לכך, יש לעיין בפרטי המוצר המצורפים לבקרי הגלוקוז או מקלוני הבדיקה.
 - הרשימה הבאה היא לעיון בלבד. הרשימה אינה מהווה המלצה על מוצרים אלה (בקרי גלוקוז או מקלוני בדיקה).
 - ההתאמות שזוהו מוצגות בטבלה להלן. יש להשתמש רק בבקרים או מקלוני בדיקה שהם ספציפיים לגלוקוז בחולים המשתמשים בתמיסת EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%). מקלוני הבדיקה מוצגים יחד עם הבקר התואם שלהם – אם הנכם משתמשים במקלוני אחרים, פנו ליצרן וודאו כי הם ספציפיים לגלוקוז. הרשימה מספקת את פרטי ההתקשרות של היצרנים הגדולים והנפוצים של בקרים/מקלוני בדיקה.
 - זוהי רשימה חלקית, המעודכנת לתאריך 1.6.2008. היעדר המוצר שלך מהרשימה אֵינו מעיד על התאמה עם EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%). בכל מקרה יש לפנות ליצרן כדי לקבל מידע עדכני.

רשימת בקרי גלוקוז לפי מדינות – מעודכן לתאריך 1.6.2008

סמלים מסחריים לגלוקוז	מתאים עם EXTRANEAL (Icodextrin) PD (Glucose-Specific) תמיסת	סוג טסט*	יצרן
CoZmonitor FreeStyle FreeStyle Flash FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite Freestyle Lite FreeStyle Mini FreeStyle Tracker Optium Omega	לא לא לא לא לא לא לא לא לא	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com גפן מדיקל בע"מ טלפון: 1800-352252
Optium Optium Xceed Precision PCx Precision QID^B Precision Xceed Precision Xceed Pro Precision Xtra Sof-Sense Sof-Tact^C	כן כן כן ¹ כן כן כן כן כן כן	GDH- NAD GDH- NAD GDH- NAD GOD¹ GOD GDH- NAD GDH- NAD GDH- NAD GDH- NAD GDH- NAD	אילקס מדיקל טלפון: 03-9385555
Advance Intuition Advance Microdraw Assure Pro Assure II Assure III Quick Tek	כן כן כן כן כן כן	GOD GOD GOD GOD GOD	Arkray www.arkrayusa.com

**רשימת בקרי גלוקוז לפי מדינות –
מעודכן לתאריך 1.6.2008**

סמלים מסחריים לגלוקוז	מתאים עם EXTRANEAL (Icodextrin) PD (Glucose-Specific)	סוג טסט*	יצרן
Ascensia Contour	לא ²	GDH-PQQ²	Bayer Healthcare
Ascensia Contour	כן ²	GDH-FAD²	www.tyco.com טאיקו-דיאגנוסטיקה טלפון: -577577-1800 טלפון: 046277388 פקס: 046277688 כתובת: שחם 5, קיסריה 38900
Ascensia Contour TS	כן	GDH-FAD	
Ascensia Breeze	כן	GOD	
Ascensia Breeze 2	כן	GOD	
Ascensia Brio	כן	GOD	
Ascensia Confirm	כן	GOD	
Ascensia Dex	כן	GOD	
Ascensia Elite	כן	GOD	
Ascensia Entrust	כן	GOD	
Ascensia Esprit	כן	GOD	
Fast Take	כן	GOD	
InDuo System	כן	GOD	
One Touch Basic ^B	כן	GOD	
One Touch Fast Take	כן	GOD	
One Touch Profile ^B	כן	GOD	
One Touch SureStep	כן	GOD	
One Touch II	כן	GOD	
One Touch Ultra	כן	GOD	
One Touch Ultra 2	כן	GOD	
One Touch Ultra Mini	כן	GOD	
One Touch Ultra Smart	כן	GOD	
Accu-Chek Active/S system	לא	GDH-PQQ	Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com דין דיאגנוסטיקה טלפון: 04 - 617530004 פקס: 04 6275402 רח' האשל 7, ת.ד. 3063, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 38900
Accu-Chek Advantage^A	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Aviva	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Comfort	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact Plus^A	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Complete System	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Go/Go S System	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek GTS/GTS Plus	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform System	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Integra System	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Perform	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Plus	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Sensor	לא	GDH-PQQ	
Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	לא	GDH-PQQ	

Test Type*

GOD= glucose oxidase (also referred to as GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

¹ שני סוגים של סרטי בדיקה עבור PCx

² שני סוגים של סרטי בדיקה עבור rContour

תאימות התקשר עם היצרן על מנת לאשר

מקורות

^A מחקר 32386 של חברת Baxter (McGaw Park) – קביעה של ההתערבות הפוטנציאלית של Icodextrin ותוצרי הלוואי שלו על מדידה של רמת

גלוקוז בדם באמצעות המערכות Accu-Check Compact ו-Advantage.

^B דוח REP-NIV-RE-366 (Nivelles) של חברת Baxter: הערכה של ההתערבות הפוטנציאלית בקביעה של רמת הגלוקוז בדם (הנמדדת

באמצעים אנזימטיים) בחולים המטופלים ב-Icodextrin.

^C דוח RD-01-RE-233 (McGaw Park) הערכה של ההתערבות הפוטנציאלית בערכת הבדיקה של רמת הגלוקוז בדם Medisense SofTact עם

Icodextrin והתוצרים שלו.

נא עיינו בכל פרטי המרשם עבור תמיסת EXTRANEAL (Icodextrin 7.5%) לדיאליזה פריטוניאלית.

Baxter ו-EXTRANEAL הם סימנים רשומים של חברת Baxter International Inc.

כל הסימנים הרשומים האחרים או המוצרים המופיעים במסמך זה הם הקניין של בעליהם.