

Листа на глюкозни монитори специфични за Македонија

Земја: Македонија (Macedonia)

Важна информација (Important Information)

Овој список е компилација од пребарувања направени преку: интернет, во литературата, во меѓународни студии спроведени од Baxter, информација од владини агенции, проспекти за тест лентички, податоци за безбедност и директна информација од производителот. Додека напорно се работеше за да се обезбедат точни и прецизни информации, Baxter не ги произведуваше овие глюкозни монитори или тест лентички, и не гарантираше за почетната или понатамошната точност на оваа информација. Ве молиме да исконтактирате со производител-от(ите) на глюкоза монитор или тест лентичките за да ја добиете последната точна информација пред да ги користите заедно со EXTRANEAL (icodextrin) раствор за перитонеална дијализа (ПД).

1. EXTRANEAL (icodextrin) раствор за перитонеална дијализа (ПД) содржи икодекстрин. Малтозата, која е метаболит на икодекстринот, може да влијае врз одредени глюкозни монитори или тест лентички. Ова влијание ќе има за резултат погрешно читање на глюкозата во крвта со употребата на овие монитори или тест лентички.
2. Ова влијание може да ја замаскира вистинската хипогликемија или да доведе до погрешна дијагноза за хипергликемија. Така, читањето на глюкозата во крвта во или над нормалните рамки кај пациентите кои примаат EXTRANEAL (icodextrin) раствор за ПД, а кои истовремено го користат глюкозниот монитор или тест лентичките може да го замаскира ниското ниво на шеќер во крвта. Ова може да предизвика пациентот или здравствениот работник да не превземаат соодветни мерки за да го доведат шеќерот во крвта во нормални рамки. Лажно покаченото ниво на глюкозата во крвта може да доведе до додавање на поголеми од потребните дози на инсулин. Во двата случаја може да дојде до ситуации опасни по живот, како губиток на свеста, кома, невролошки оштетувања или смрт.
3. Дијализното одделение или пациентот треба да исконтактираат со производител-от(ите) на глюкоза монитор или на тест лентичките за да утврди дали мониторот или тест лентичките интерферираат со икодекстрин или малтоза, или дали ја мерат само глюкозата во крвта. Исто така консултирајте го упатството за употреба кое е приложено со монитор за глюкоза или тест лентичките.
 - Дефинираните компатабилности се прикажани во табелата подолу. **Само глюкозно – специфични монитори или тест лентички можат да бидат користени кај пациенти кои примаат EXTRANEAL (icodextrin) раствор за ПД.** Тест лентичките се наброени заедно со нивните монитори-доколку користите други лентички, исконтактирајте го производителот за да ви потврди дека тие се глюкозни специфични. Списокот содржи контакт информации за најопштите, главните производители на брендирани монитори или тест лентички.
 - Овој список не е целокупен, како што е оној од 20.05.2008. Неприсутноста на вашите специфични глюкозни монитори или тест лентички во списокот НЕ подразбира и компатабилност со EXTRANEAL. Секогаш побарајте најнова информација од производителот.

Листа на глюкозни монитори специфични за Македонија

ГЛУКОЗА МОНИТОРИ

Дата на последни податоци: 20.05.2008

Брендирани Глюкозни Монитори	Компатабилност со EXTRANEAL (icodextrin) раствор за ПД (Глукозно специфични)	Тип на Тест*	Производител
CoZmonitor FreeStyle FreeStyle Flash FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite Freestyle Lite FreeStyle Mini FreeStyle Tracker Optium Omega	Не Не Не Не Не Не Не Не Не	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Увозник на Abbott дијагностика Фармахем: Тел: (02) 2031 193
Optium Optium Xceed Precision PCx Precision QID ^B Precision Xceed Precision Xceed Pro Precision Xtra Sof-Sense Sof-Tact ^C	Да Да Да ¹ Да Да Да Да Да Да	GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD, GOD ¹ GOD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD	
Advance Intuition Advance Microdraw Assure Pro Assure II Assure III Quick Tek	Да Да Да Да Да Да	GOD GOD GOD GOD GOD GOD	www.arkravusa.com N/A
Ascensia Contour	Не ²	GDH-PQQ ²	Bayer Healthcare
Ascensia Contour Ascensia Contour TS Ascensia Breeze Ascensia Breeze 2 Ascensia Brio Ascensia Confirm Ascensia Dex Ascensia Elite Ascensia Entrust Ascensia Esprit	Да ² Да Да Да Да Да Да Да Да	GDH-FAD ² GDH-FAD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD	www.ascensia.com N/A
Fast Take InDuo System One Touch Basic ^B One Touch Fast Take One Touch Profile ^B One Touch SureStep One Touch II One Touch Ultra One Touch Ultra 2 One Touch Ultra Mini One Touch Ultra Smart	Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да	GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD	Lifescan, Inc. www.lifescan.com N/A
Accu-Chek Active/S System Accu-Chek Advantage^A Accu-Chek Aviva Accu-Chek Comfort Accu-Chek Compact	Не Не Не Не Не	GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ	Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com Увозник на Roche

Листа на глюкозни монитори специфични за Македонија

Брендирани Глюкозни Монитори	Компатабилност со EXTRANEAL (icodextrin) раствор за ПД (Глюкозно специфични)	Тип на Тест*	Производител
Accu-Chek Compact Plus ^A	Не	GDH-PQQ	дијагностика: АДРИАМЕД-НKP ДОО Тел: (02) 3 299 600
Accu-Chek Complete System	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Go/Go S System	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek GTS/GTS Plus	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform System	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Integra System	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Performa	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Plus	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Sensor	Не	GDH-PQQ	
Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	Не	GDH-PQQ	

Tip na Test*

GOD= глюкоза оксидаза (истото се однесува како и за GO)

GDH-PQQ = глюкоза дихидрогеназа со пиролкинолинкинон

GDH-NAD= глюкоза дихидрогеназа со никотинамид-аденин динуклеотид

GDH-FAD= глюкоза дихидрогеназа со флавин-аденин динуклеотид

¹ Два типа на тест лентички за PCx

² Два типа на тест лентички за Contour.

Контактирајте го производителот за да ја потврдите компатабилноста.

¹ Two types of test strips for PCx

² Two types of test strips for Contour.

Contact manufacturer to confirm compatibility.

Test Type*

GOD= glucose oxidase (also referred to as GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Referenci:

^A Baxter студија 32386 (McGaw Park) Утврдување на потенцијалната интерференца на icodextrin и малтозата при мерење на глюкозата во крвта со употреба на глюкозен монитор Accu-Chek compact и Advantage systems.

^B Baxter извештај REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Проценување на потенцијалната интерференца во утврдувањето на глюкозата во крвта (мерења со метода на ензими) за пациентите кои се лекуваат со icodextrin.

^C Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Проценување на потенцијалната интерференца на icodextrin и неговите метаболити во утврдувањето на глюкозата во крвта со тест лентички MediSense Sof-Tact.

Ве молиме прочитајте го целосно упатството за употреба за EXTRANEAL (icodextrin) ПД раствор .

Baxter I EXTRANEAL се заштитни марки на Baxter International Inc

Други заштитни марки кои се споменуваат во овој документ се сопственост на други производители.