

Viktig information

Denna lista är framtagen från sökningar via internet, litteratur, Baxters interna studier, myndighetsinformation, produktinformation från teststickor, varningstexter och direktinformation från tillverkarna. Ansträngningar har gjorts för att samla in aktuell information. Baxter säljer inte dessa blodglukosmätare eller teststickor och kan inte heller garantera att den nuvarande eller fortsatta informationen är korrekt. Var vänlig och kontakta tillverkarna av blodglukosmätare och teststickor direkt för att få den senaste gällande informationen vid användning i samband med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysvätska.

1. EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysvätska innehåller icodextrin. Maltos som är en nedbrytningsprodukt av icodextrin, kan interferera med vissa blodglukosmätare och teststickor. Denna påverkan kan resultera i ett falskt förhöjt mätvärde när man använder dessa blodglukosmätare eller teststickor.
2. Denna påverkan kan maskera en verklig hypoglykemi eller leda till en felaktig diagnos av hyperglykemi. Därmed kan det innebära att blodglukosvärden inom eller över normalvärdena hos patienter som använder EXTRANEAL (icodextrin) kan maskera ett lågt blodglukosvärde vid användning av dessa glukosmätare eller teststickor. Detta kan i sin tur göra att patienter eller sjukvårdspersonal inte vidtar nödvändiga åtgärder för att normalisera blodsockervärdet. Mätningen av ett falskt förhöjt blodsockervärde kan dessutom förorsaka att patienten får mer insulin än nödvändigt. Båda dessa situationer kan leda till livshotande tillstånd som medvetslöshet, koma, hjärnskada eller död.
3. Dialysavdelningen eller patienten skall kontakta tillverkaren av blodglukosmätaren eller teststickan som de använder för att avgöra om denna blodglukosmätare eller teststicka påverkas av icodextrin eller maltos eller om de endast mäter glukos. Läs också den produktinformation som bifogas blodglukosmätaren eller teststickan.
 - Följande lista är endast en referenslista. Listan ger inga rekommendationer till dessa blodglukosmätare eller teststickor.
 - Känd kompatibilitet visas i tabellen nedan. **Använd endast blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika i samband med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysvätska.** Teststickorna är listade tillsammans med passande blodglukosmätare – om du använder andra teststickor ta kontakt med leverantören för att få information om de är glukosspecifika. Listan innehåller kontaktinformation till de vanligaste stora företagen som tillhandahåller blodglukosmätare och teststickor.
 - Denna lista, gällande från 16 Maj, 2008, är inte en fullständig lista. Om listan inte innehåller din specifika blodglukosmätare eller teststicka, betyder INTE det att den går att använda tillsammans med EXTRANEAL. Ta alltid kontakt med leverantören för aktuell information.

BLODGLUKOSMÄTARE

Uppdaterad 16 Maj, 2008

| Blodglukosmätare | Kompatibla med Extraneal (icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika) | Testtyp* | Tillverkare |
|------------------------|--|----------|---|
| CoZmonitor | Nej | GDH-PQQ | AbbottDiabetes Care http://www.abbottdiabetescare.fi/ Tel. 0800 555 500 |
| FreeStyle | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Flash | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Freedom | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Freedom Lite | Nej | GDH-PQQ | |
| Freestyle Lite | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Mini | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Tracker | Nej | GDH-PQQ | |
| Optium Omega | Nej | GDH-PQQ | |

BLODGLUKOSMÄTARE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Optium Optium Xceed Precision PCx Precision QID ^B Precision Xceed Precision Xceed Pro Precision Xtra Sof-Sense Sof-Tact ^C | Ja Ja Ja ¹ Ja Ja Ja Ja Ja Ja | GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD, GOD ¹ GOD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD GDH-NAD | http://www.abbottdiabetescare.fi/ |
| Advance Intuition Advance Microdraw Assure Pro Assure II Assure III Quick Tek | Ja Ja Ja Ja Ja Ja | GOD GOD GOD GOD GOD GOD | Arkray (Markanadsförs inte i Finland) |
| Ascensia Contour | Nej² | GDH-PQQ² | Bayer HealthCare www.bayerdiabetes.fi |
| Ascensia Contour Ascensia Contour TS Ascensia Breeze Ascensia Breeze 2 Ascensia Brio Ascensia Confirm Ascensia Dex Ascensia Elite Ascensia Entrust Ascensia Esprit | Ja ² Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja | GDH-FAD ² GDH-FAD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD | www.ascensia.com Tel. 020 78 521 |
| Fast Take InDuo System One Touch Basic ^B One Touch Fast Take One Touch Profile ^B One Touch SureStep One Touch II One Touch Ultra One Touch Ultra 2 One Touch Ultra Mini One Touch Ultra Smart | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja | GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD | Lifescan, Inc. http://www.celego.fi/verensokerin_mittaus www.lifescan.com Tel. 0800 122 322 |
| Accu-Chek Active/S System Accu-Chek Advantage^A Accu-Chek Aviva Accu-Chek Comfort Accu-Chek Compact Accu-Chek Compact Plus^A Accu-Chek Complete System Accu-Chek Go/Go S System Accu-Chek GTS/GTS Plus Accu-Chek Inform System Accu-Chek Integra System Accu-Chek Performa Accu-Chek Plus Accu-Chek Sensor Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System | Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej | GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ | Roche Diagnostics http://www.accu-chek.fi/nordic/ Tel. 010 554 511 |

BLODGLUKOSMÄTARE

¹ Två typer av teststickor för PCx.

² Två typer av teststickor för Contour.

Kontakta tillverkaren för att säkerställa kompatibilitet.

Testtyp*

GOD = glukosoxidas (kallas också GO)

GDH-PQQ = glukosdehydrogenas med pyrrolokinolinquinon

GDH-NAD = glukosdehydrogenas med nicotinamidadenin dinukleotid

GDH-FAD = glukosdehydrogenas med flavinadenindinukleotid

Test Type*

GOD = glucose oxydase (also referred to as GO)

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase pyrroloquinoline-quinone

GDH-NAD = glucose dehydrogenase nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase flavine-adenine dinucleotide

Referenser:

^A Baxter study 32386 (McGaw Park). Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek Compact and Advantage systems.

^A *Baxterstudie 32386 (McGaw Park). Fastställande av potentiella interferenser av icodextrin och dess metaboliter i humanblod vid blodglukosmätning med Accu-Chek compact och Advantage systemen.*

^B Baxter report REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.

^B *Baxterrapport REP-NIV-RE-366, (Nivelles). Utvärdering av potentiella interferenser vid bestämning av blodglukos (enzymatisk mätmetod) för patienter behandlade med icodextrin.*

^C Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit MediSense Sof-Tact with icodextrin and its metabolites.

^C *Baxterrapport RD-01-RE-233 (McGaw Park). Utvärdering av potentiella interferenser av icodextrin och dess metaboliter med MediSense Sof-Tact testkit..*

För övrig information var god se produktresumé (SPC) för EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialyslösning.

Baxter och EXTRANEAL är varumärken hos Baxter International Inc.

Övriga varumärken och produkter på denna sedan tillhör respektive leverantör.