

Liste over blodsukkerapparater i Norge

Land: Norge (Norway)

Viktig informasjon

Denne listen er satt sammen etter søk via: Internett, litteratur, Baxters interne studier, informasjon fra myndigheter, produktinformasjon fra teststrimler, sikkerhetsadvarsler og direkte informasjon fra produsenten av produktene. Det er brukt krefter på å samle inn nøyaktig og gjeldende informasjon, men Baxter produserer ikke disse blodsukkerapparatene eller teststrimler og kan ikke garantere at denne informasjonen til enhver tid er korrekt. Vennligst kontakt produsenten(e) av blodsukkerapparatene og teststrimlene for å få den siste gjeldende informasjon før bruk sammen med EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske.

- EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske inneholder ikodekstrin. Maltose, et nedbrytningsprodukt av ikodekstrin, kan påvirke visse blodsukkerapparater eller teststrimler. Påvirkningen kan resultere i en falsk forhøyet blodsuktermåling hos pasienter som bruker disse apparatene eller teststrimlene.
- Denne påvirkningen kan kamuflere en sann hypoglykemi eller føre til en feilaktig diagnose av hyperglykemi. En blodsuktermåling innenfor eller over normalområdet hos en pasient som bruker EXTRANEAL (ikodekstrin) peritonealdialysevæske ved bruk av disse apparatene eller teststrimler kan derfor kamuflere et lavt blodsukker. Dette kan medføre at en pasient eller helsepersonell ikke tar nødvendige forholdsregler for å få blodsukkeret på et normalt nivå. En falsk forhøyet blodsuktermåling kan også medføre at pasienten får mer insulin enn nødvendig. Begge disse situasjonene kan føre til livstruende tilstander, inkludert tap av bevissthet, koma, nevrologiske skader eller død.
- Dialyseavdelingen eller pasienten bør kontakte produsenten(e) av blodsukkerapparatet og/eller teststrimlene for å finne ut om blodsukkerapparatet og/eller teststrimlene som brukes, påvirkes av ikodekstrin eller maltose eller om de kun måler glukose. Les også produktinformasjonen som følger med blodsukkerapparatet og teststrimlene.
 - Følgende liste er kun ment som en referanse. Listen gir ingen anbefalinger med hensyn til disse blodsukkerapparatene eller teststrimlene.
 - Identifisert kompatibilitet er vist i nedenstående tabell. **BRUK KUN glukose-spesifikke blodsukkerapparater og teststrimler til pasienter som bruker EXTRANEAL (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske.** Teststrimlene er oppført sammen med de blodsukkerapparatene de passer til – hvis du bruker andre teststrimler, kontakt produsenten for å finne ut om de er glukose-spesifikke. Listen inneholder kontaktinformasjon til produsentene av de mest vanlige blodsukkerapparatene/teststrimlene.
 - Denne listen er ikke-uttømmende og gyldig fra 2-Juni-2008. Hvis listen ikke inneholder ditt spesifikke glukoseapparat eller teststrimmel, betyr det **IKKE** nødvendigvis at det er kompatibelt med EXTRANEAL. Kontakt alltid produsenten for oppdatert informasjon.

BLODSUKKERAPPARATER

Oppdatert 2-Juni-2008

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske (Glukose-spesifik)	Testtype*	Produsent
CoZmonitor	Nei	GDH-PQQ	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Tlf.: 80 08 71 00
FreeStyle	Nei	GDH-PQQ	
FreeStyle Flash	Nei	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom	Nei	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom Lite	Nei	GDH-PQQ	
Freestyle Lite	Nei	GDH-PQQ	
FreeStyle Mini	Nei	GDH-PQQ	
FreeStyle Tracker	Nei	GDH-PQQ	
Optium Omega	Nei	GDH-PQQ	
Optium	Ja	GDH-NAD	
Optium Xceed	Ja	GDH-NAD	
Precision PCx	Ja ¹	GDH-NAD, GOD ¹	
Precision QID ^B	Ja	GOD	
Precision Xceed	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Precision Xtra	Ja	GDH-NAD	
Sof-Sense	Ja	GDH-NAD	
Sof-Tact ^C	Ja	GDH-NAD	
Advance Intuition	Ja	GOD	Arkray www.arkravusa.com
Advance Microdraw	Ja	GOD	
Assure Pro	Ja	GOD	
Assure II	Ja	GOD	

Liste over blodsukkerapparater i Norge

Blodsukkerapparat	Kompatibel med Extraneal (Ikodekstrin) peritonealdialysevæske (Glukose-spesifik)	Testtype*	Produsent
Assure III	Ja	GOD	
Quick Tek	Ja	GOD	
Ascensia Contour	Nei²	GDH-PQQ²	Bayer Healthcare www.ascensia.com www.ascensia.no www.baverdiabetes.no Tlf.: 24 11 18 00
Ascensia Contour	Ja ²	GDH-FAD ²	
Ascensia Contour TS	Ja	GDH-FAD	
Ascensia Breeze	Ja	GOD	
Ascensia Breeze 2	Ja	GOD	
Ascensia Brio	Ja	GOD	
Ascensia Confirm	Ja	GOD	
Ascensia Dex	Ja	GOD	
Ascensia Elite	Ja	GOD	
Ascensia Entrust	Ja	GOD	
Ascensia Esprit	Ja	GOD	
Fast Take	Ja	GOD	Lifescan, Inc. www.lifescaneurope.com www.lifescaneurope.com/nor/ Tlf.: 80 03 50 25
InDuo System	Ja	GOD	
One Touch Basic ^B	Ja	GOD	
One Touch Fast Take	Ja	GOD	
One Touch Profile ^B	Ja	GOD	
One Touch SureStep	Ja	GOD	
One Touch II	Ja	GOD	
One Touch Ultra	Ja	GOD	
One Touch Ultra 2	Ja	GOD	
One Touch Ultra Mini	Ja	GOD	
One Touch Ultra Smart	Ja	GOD	
Accu-Chek Active/S System	Nei	GDH-PQQ	Roche Diagnostics Norge AS www.roche-diagnostics.com www.roche-diagnostics.no www.accu-chek.com Tlf.: 23 37 33 00
Accu-Chek Advantage^A	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Aviva	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Comfort	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact Plus^A	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Complete System	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Go/Go S System	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek GTS/GTS Plus	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform System	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Integra System	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Performa	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Plus	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Sensor	Nei	GDH-PQQ	
Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	Nei	GDH-PQQ	

¹ To typer teststrimler for PCx

² To typer teststrimler for Contour.

Kontakt produsenten for å sjekke kompatibilitet.

¹ Two types of test strips for PCx

² Two types of test strips for Contour.

Contact manufacturer to confirm compatibility.

Testtype*

GOD= glukoseoksidase (også kalt GO)

GDH-PQQ= glukosedehydrogenase med pyrroloquinolinquinon

GDH-NAD= glukosedehydrogenase med nikotinamid-adenin dinukleotid

GDH-FAD= glukosedehydrogenase med flavin-adenin dinukleotid

Test Type*

GOD= glucose oxidase (also referred to as GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Referanser:

^A Baxter study 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage systems.

Liste over blodsukkerapparater i Norge

^B Baxter report REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.

^C Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit MediSense Softact with icodextrin and its metabolites.

Vennligst se produktinformasjon for EXTRANEAL (ikodekstrin) peritonealdialysevæske på www.glucosafety.com.

Baxter og EXTRANEAL er varemerker som tilhører Baxter International Inc.

Andre varemerker og produkter på disse sidene tilhører de respektive produsenter.