

# 警告

## 可能导致血糖值判读错误

患者姓名

正在使用百特艾考糊精腹膜透析液  
(Baxter EXTRANEAL (Icodextrin))

如需查询相关资料, 包括与之相容的血糖仪目录  
请参阅[www.glucoesafety.com](http://www.glucoesafety.com)

**只能使用**具有葡萄糖专一性的血糖仪或试纸。这些是临床实验室里普遍使用的方式, 请确认是否使用此种检测方法。

**不可使用**利用葡萄糖去氢酶GDH-PQQ(glucose dehydrogenase pyrroloquinoline quinone) 或葡萄糖染色剂氧化还原酶 (glucose-dye-oxidoreductase) 的方式测量血糖的血糖仪或试纸。除此之外, 部分但非全部以glucose dehydrogenase-with flavin-adenine dinucleotide(GDH-FAD)测试方式的血糖仪或血糖试纸也是不可使用的。这些方法可能导致使用百特艾考糊精腹膜透析液 (Baxter EXTRANEAL (Icodextrin)) 的患者因麦芽糖干扰而被误测血糖值偏高。患者实际的血糖值正常或过低, 被误判为血糖过高, 可能威胁患者生命安全。