

PRECAUCION

Posibilidad de Error en la Lectura de Glucosa en Sangre

Nombre del Paciente

**Esta usando Solución de
Diálisis Peritoneal
EXTRANEAL (icodextrina)**

Baxter

BAXTER y EXTRANEAL son marcas registradas de Baxter International.

EMPLEE SOLAMENTE monitores de glucosa y tiras de control que sean glucosa-específicos. Estos métodos son comunes en los laboratorios clínicos. Contacte al fabricante del monitor de glucosa y tiras de control para determinar el método usado.

NO USE monitores de glucosa o tiras de control que utilicen métodos basados en glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH-PQQ) o la glucosa-di-oxidorreductosa. Adicionalmente, algunos pero no todos los monitores y tiras de control que utilicen métodos basados en glucosa deshidrogenasa flavin-adenina dinucleotida (GDH-FAD) no deberían ser usados. El uso de estos métodos puede resultar en una lectura de glucosa en sangre falsamente elevada en aquellos pacientes que usen EXTRANEAL (icodextrina) debido a la interferencia de la maltosa. La lectura de glucosa en sangre falsamente elevada podría ocultar una hipoglucemia real o provocar un diagnóstico errado de hipoglucemia, que pudiera causar eventos potencialmente fatales.

Para más información, visite www.glucozesafety.com, en donde encontrará una lista de monitores de glucosa compatibles, o llame a la línea 018000939595.

FTM-LP-010-22 V3 (Fecha emisión 2010/07/15)