

PERINGATAN DAN PERHATIAN

Risiko Kesalahan Pembacaan Hasil Pemeriksaan Gula Darah

Nama Pasien :

Penggunaan cairan peritoneal dialisis
EXTRANEAL (*icodextrin* 7.5%)

Gunakan monitor dan strip tes yang spesifik terhadap glukosa (*Glucose Spesific*). Metode pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium. Hubungi perusahaan yang memproduksi alat monitor glukosa dan strip tes untuk memastikan metode yang digunakan.

Tidak diperbolehkan menggunakan alat monitor dan strip tes yang menggunakan metode enzim *dehydrogenase pyrroloquinoline quinone* (GDH-PQQ) atau *glucose-dye-oxidoreductase*. Informasi tambahan ada beberapa tetapi tidak semua monitor glukosa atau strip tes yang menggunakan *glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide* (GDH-FAD) tidak dapat digunakan, penggunaan metode ini dapat menyebabkan hasil positif palsu berupa kadar gula darah yang tinggi pada pasien yang menggunakan EXTRANEAL (*icodextrin* 7.5%) karena gangguan maltosa, kesalahan pembacaan peningkatan gula darah akan menutupi kondisi hipoglikemia atau menyebabkan kesalahan diagnosis hiperglikemia yang beresiko menyebabkan keadaan yang mengancam jiwa.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai EXTRANEAL dan glukometer yang kompatibel, kunjungi www.glucosesafety.com.

MY-RC21-210001

Baxter

BAXTER dan EXTRANEAL adalah hak milik Baxter Internasional



Dipasarkan oleh :

KALBE